

使用冷凍乾燥品管檢體的注意事項

1. 收到檢體後請將檢體儲藏於零下 20 以下的冷凍庫。
2. 請務必小心開啟檢體瓶蓋，瓶蓋打開後，將瓶蓋翻轉放置，任何一絲乾燥粉末都不容落失。加入 **0.5ml distilled water** 後，蓋回瓶蓋，並再次檢查是否有粉末遺落，確定無粉末遺落後，將檢體先坐冰靜置 5 分鐘，再輕輕搖動混合。
3. 檢體完全溶解後，即是 **Hemolysate**，不需要再加入 Lysing reagent 稀釋。
4. 檢驗過程中，請將檢體坐冰保存；每次取檢體前，再將檢體輕輕地混合均勻。